

INCIDIN® WIPES - SYSTÉM VLHČENÝCH UTĚREK

Utěrky Incidin® Premium / Incidin® Basic Zásobník na utěrky Incidin®

K profesionálnímu čištění a dezinfekci ploch všeho druhu

Systém vlhčených utěrek Incidin® sestává z univerzálně použitelného dávkovacího zásobníku utěrek a z utěrek z netkané textilie ve dvou kvalitách Incidin® Premium a Incidin® Basic.

Utěrky Incidin® jsou určeny pro plošnou dezinfekci v kombinaci s dezinfekčními prostředky Ecolab. Tento systém umožňuje maximálně jednoduché a uživatelsky příjemné provádění dezinfekce povrchů.

- ▲ **Dávkovací zásobník utěrek Incidin®**
 - Opakovaně uzavíratelný a těsný
 - Odolný proti účinkům dezinfekčních prostředků
 - Vybavený výměnným uzavíracím víčkem, dodává se ve 4 barvách
- ▲ **Utěrky Incidin® Premium**
 - vysoce kvalitní utěrky z netřepivé netkané textilie
 - Dodávají se v roli obsahující 99 utěrek o velikost 20 x 38 cm, 60 g/m²
- ▲ **Utěrky Incidin® Basic**
 - kvalitní utěrky s děrovanou strukturou zajišťující dobrý čistící účinek
 - Dodávají se v roli obsahující 99 utěrek o velikost 20 x 38 cm, 40 g/m²




Incidin® Wipes - systém vlhčených utěrek

K profesionálnímu čištění a dezinfekci ploch všeho druhu

Utěrky Incidin® pro rychlou dezinfekci povrchů

| Naše nabídka | Vaše výhoda |
|--|---|
| Utěrky jsou analyticky a mikrobiologicky testovány v laboratoři a uzpůsobeny pro použití v kombinaci s dezinfekčními prostředky Incidin® Plus, Incidin® Extra N, Incidin® Rapid, Incidin® Liquid, Incidin® Foam, Incidur a Incidur spray | Optimální vlastnosti, pokud jde o bezpečnost a používání v kombinaci s osvědčenými prostředky pro plošnou dezinfekci dodávaných společností Ecolab. |
| Dávkovací zásobník je vyroben z vysoce kvalitního materiálu, který lze umývat v mycích strojích a je odolný proti účinkům dezinfekčních prostředků. | Systém utěrek Incidin® lze dokonale začlenit do stávajících systémů plošné dezinfekce obsahujících produkty Ecolab |
| Uzavírací víčka se dodávají ve čtyřech barvách: zelené (standardní provedení), žluté, modré a červené (v rámci speciální objednávky). Uzávěry je navíc možno samostatně vyměňovat. | Prostřednictvím barevného kódování lze jednoznačně rozlišovat jak mezi různými dezinfekčními prostředky tak i mezi různými oblastmi použití. |
| Roztoky produktů Incidin® Plus, Incidin® Extra N, Incidin® Rapid a Incidur je možno používat v osvědčených koncentracích. Produkty Incidin® Liquid, Incidin® Foam a Incidur spray je při plnění nutno používat vždy v neředěném stavu. | V podobě utěrek Incidin® používaných v kombinaci s osvědčenými produkty je k dispozici uživatelsky příjemný a flexibilní systém umožňující efektivní a rychlou formu aplikace dezinfekčních prostředků. |

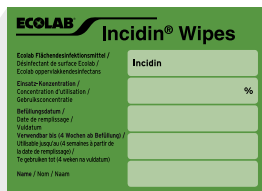

Pro každé opakované plnění zásobníku utěrkami z netkané textilie jsou v balení navíc obsaženy originální bezpečnostní etikety pro odpovídající označení dávkovacího zásobníku utěrek (produkt, datum naplnění, ředění apod.).

Produkty



Aplikace



Servis



Bezpečnost




| Produkt | koncentrace % | expoziční |
|-----------------|----------------------|------------------|
| Incidin rapid | 0,25% / 0,5% / 0,75% | 60 / 30 / 5 min |
| Incidin plus | 0,5% / 1% / 2% | 60 / 30 / 15 min |
| Incidin extra N | 0,5% / 1% / 2% | 60 / 30 / 15 min |
| Incidur | 1% / 1,5% / 2% | 60 / 30 / 15 min |
| Incidin extra | 1% / 2% / 3% | 60 / 30 / 15 min |

| Produkt | koncentrace % | expoziční |
|----------------|---------------|-----------|
| Incidin liquid | 100% | 5 min |
| Incidin foam | 100% | 1 min |
| Incidur spray | 100% | 5 min |

POKYNY A DOPORUČENÍ K POUŽITÍ




Oblékněte si rukavice a sejměte víčko. Před opětovným naplněním vytřete dávkovací zásobník utěrek z netkané textilie dezinfekčním roztokem, v případě potřeby jej vycistěte.

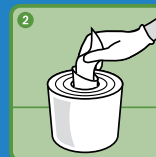

Vyjměte roli utěrek z netkané textilie z obalu a ze středu svitku povytáhněte první utěrku.



Roli utěrek Incidin® Premium nebo Incidin® Basic vložte do dávkovacího zásobníku.

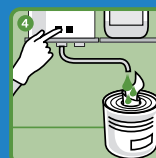

Naplňte dávkovací zásobník roztokem prostředku pro plošnou dezinfekci: Incidin® Plus, Incidin® Extra N, Incidin® Rapid nebo Incidur o požadované aplikační koncentraci. Plňte-li zásobník dezinfekčními prostředky Incidin® Liquid, Incidin® Foam nebo Incidur spray, nechejte je v neředěném stavu. Při použití utěrek Incidin® Premium naplňte 2,3 až 2,5 litru roztoku, při použití utěrek Incidin® Basic naplňte 2,0 až 2,2 litru roztoku.



Protáhněte první utěrku otvorem ve víčku a poté tímto víčkem uzavřete nádobu dávkovacího zásobníku. Po naplnění dávkovacího zásobníku roztokem počkejte 30 až 60 minut, aby všechny utěrky optimálně nasáklly.



Utěrky napuštěné roztokem je možno používat 28 dnů. Po každém naplnění nalepte na dávkovací zásobník bezpečnostní etiketu opatřenou odpovídajícím popisem

INFORMACE K OBJEDNÁVÁNÍ

| Produkt | Balení | Číslo položky |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| Dávkovací zásobník utěrek Incidin® | 1 kus v kartónu | 100 10 283 |
| Utěrky Incidin® Premium | 6 rolí po 99 utěrkách v kartónu | 100 10 279 |
| Utěrky Incidin® Basic | 6 rolí po 99 utěrkách v kartónu | 100 10 278 |

Ecolab Healthcare

Čistota. Bezpečnost. Ochrana zdraví.